

# CRYOPOL

## LOKALE KRYOTHERAPIE

Einfache und effektive Methode zur Verbesserung allgemeiner Lebensqualität, schnellen Erholung, Leistungsoptimierung und aktiven Prävention in Sport, Fitness, Physiotherapie, lokale Rehabilitation & Wellness.

CRYO  
**BOX**



**CRYONiQ**

PREMIUM KRYOTHERAPIE  
HERSTELLER



# CRYOPOL

## Lokale Kryotherapie

Cryofan wird in der Kosmetik, Dermatologie, Traumatologie und Sportmedizin wegen seiner heilenden Eigenschaften zunehmend eingesetzt. Mit dem Cryopol können wir uns auf jeden Bereich des Körpers beziehen, den wir mit intensiver Kälte behandeln möchten. Der Cryopol verwendet kühlen Gasstrom, der aus flüssigem Stickstoffdampf gewonnen wird. Der Luftstrom erreicht Temperaturen von bis zu  $-130^{\circ}\text{C}$ .

Die Behandlung mit dem Cryopol dauert je nach behandelter Stelle und Zustand in der Regel 10 bis 20 Minuten. Das Gerät selbst ist kompakt und kann in jeder Klinik, Sportstätte oder im Schönheitssalon bequem verwendet werden.

Der Cryopol kann ohne ärztliche Zulassung und ohne medizinische Qualifizierung verwendet werden. Allerdings müssen alle zukünftigen Bediener des Cryopol an einer Schulung zu Betrieb und Sicherheit teilnehmen. Grundkenntnisse der Anatomie und Physiotherapie des Menschen sind von Vorteil. Cryopol ist als kosmetisches Gerät für Wellnessbehandlung definiert, das Produkt ist jedoch medizinisch zertifiziert und kann in einem medizinischen Umfeld verwendet werden.

Die wichtigsten Vorteile des Cryopol sind seine Tragbarkeit, Effizienz, Geräuscharmheit und Benutzerfreundlichkeit. Die Zeit, die für den Start und das Erreichen der Arbeitstemperatur benötigt wird, liegt unter 1 Minute, während der Verbrauch an flüssigem Stickstoff pro Behandlung 1,5 Liter flüssigen Stickstoff nicht überschreitet.



## POSITIVE WIRKUNGEN

- Schmerzlinderung
- Entzündungsminderung
- Abbau von Muskelspannung
- Schwellungsminderung
- Gelenkbeweglichkeit
- Steigerung Muskelkraft
- Bessere Heilung nach Verbrennungen
- Beschleunigung der Heilprozesse nach Verletzungen
- Schnellere Regeneration nach Sportlicher Belastung
- Verbesserung der Gewebespannung (kann bei Cellulite helfen)
- Beschleunigte Gewebeheilung nach Mikroblading



## KURZFASSUNG

- ✓ **PRAKTISCH**  
Leicht & mobil
- ✓ **ÖKONOMISCH**  
1,5 Liter pro 10 Minuten Verbrauch
- ✓ **DESIGN**  
Modern & funktionell
- ✓ **PROFITABEL**  
Branchenführender ROI
- ✓ **ÖKOLOGISCH**  
Flüssigstickstoff Kühlmittel
- ✓ **CLEVER**  
Einfaches Kontrollsystem

# TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

SPEZIFIKATION	WERT
Stromversorgung :	220V AC, 50Hz
Flüssigstickstoff Dewar Tank Kapazität (Liter):	Standard 30 L Varianten: 15 L, 20 L, 26 L
Flüssigstickstoff Dewar Tank Kapazität (kg):	25,2 Kg
Kühlungsmedium : LN2	Flüssigstickstoff
Flüssigstickstoff Verbrauch	1,5 Liter pro 10 Min. Verbrauch
Verdampfungsverlust ohne eingebauten Heizkörper (kg/24h):	0,10
Verdampfungsverlust mit eingebauten Heizkörper (kg/24h):	0,50
Gasstrom Temperatur:	-130°C
Erreichung Betriebstemperatur - s:	0,30 s

## BREITES EINSATZSPEKTRUM



Medizin  
Rehabilitation




Beauty  
Wellness



Sport  
Fitness



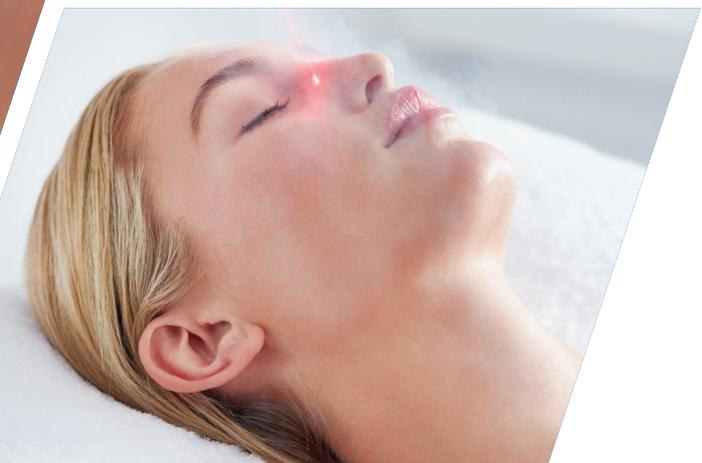

 **CRYONIQ**

**C.B.M.**  
V E R T R I E B

C.B.M. Vertrieb  
Friedrichstraße 83  
D-88045 Friedrichshafen  
USt-ID Nr. DE244021142

info@cryo-box.de  
www.cryo-box.de  
+49 (0) 75 41 - 97 10 925  
+49 (0) 171 - 73 75 928

*Schauen Sie sich unsere  
neueste Produktlinie an*

