

CRYO BOX XC PLUS

CRYO BOX XC



CRYO BOX XC PLUS | CRYO BOX XC

GİRİŞ

CRYO BOX XC, etkili, güvenli ve rahat kriyoterapi uygulaması için tasarlanmış, teknolojik olarak gelişmiş bir tüm vücut kriyoterapi odasıdır.

CRYO BOX XC PLUS, güvenli ve ergonomik günlük kullanım için çift kapı, müşteri asansörü, seans bilgi ekranı, dokunmatik kontrol paneli ve en yeni güvenlik kiti gibi en son özelliklerle donatılmıştır. Kompakt boyutları, modern tasarımı, verimliliği ve mükemmel kriyoterapi deneyimi, onu hem işletmeler hem de bireyler için ideal bir seçim haline getirmektedir.

CRYO BOX XC fizyoterapi klinikleri, spor salonları, spor kulüpleri, kaplıcalar, güzellik klinikleri ve özel evler için mükemmel bir eklentidir.



GİRİŞ TÜM VÜCUT KRİYOTERAPİSİ

Tüm vücut kriyoterapi seansı, hızlı iyileşmeyi desteklemek, performansı artırmak, yorgunluğu azaltmak, güzelliği geliştirmek ve genel refahı iyileştirmek için vücudu -160 °C / -256 °F kadar düşük aşırı soğuğa maruz bırakan üç dakikalık bir tedavidir.

Seansın tamamlanması yalnızca 2 ila 3 dakika sürer ve müşterilere su veya buza dayalı geleneksel kriyoterapi yöntemlerinin sunabileceğinin çok ötesinde faydalar sağlar.



FİZYOTERAPİ

- Ağrı Kesici
- Şişliğin Azaltılması
- Enflamasyonun Azaltılması
- Geliştirilmiş Kan Dolaşımı
- Daha Hızlı İyileşme



SPOR

- Performans Artışı
- İyileşme Süresi Azalımı
- Ağrı Kesici
- Enflamasyonun Azaltılması



ESTETİK

- Selülitin Azaltılması
- Kolajen Artışı
- Cilt Dokusunda İyileşme
- Kozmetik Prosedürler Sonrası
- Daha Hızlı İyileşme



REFAH

- Geliştirilmiş Uyku Kalitesi
- Artan Enerji Seviyeleri
- Genç Görünümün İyileştirilmesi

CRYO BOX XC PLUS | CRYO BOX XC

ÖNEMLİ NOKTALAR

Özelleştirme

25 farklı renk
kombinasyonu mevcuttur

Operatör dokunmatik ekrani

Kolay oturma yönetimi sağlayan
operatöre dönük dokunmatik ekran

Sektör lideri güvenlik standartları

Her zaman güvenli çalışma için
10'a kadar gelişmiş güvenlik
özelliği



Oturum bilgi ekranı

Kalan oturma süresini ve mevcut sıcaklığı
gösteren müşteriye dönük bilgi ekranı

Termal kontrast modu

Kriyo etkilerini artırmak için benzersiz
Isı/Kriyo seansı seçeneği

Üstün kalite

Güvenilir çalışma ve üstün kriyoterapi
seansı deneyimi ile birleştirilmiş en
yüksek kaliteli parçalar

CRYO BOX XC PLUS | CRYO BOX XC

ÖZELLİKLER



ÖZELLİKLER	CRYO BOX XC	CRYO BOX XC PLUS
21,5" DOKUNMATİK EKРАН - KONTROL PANELİ	✓	✓
15" MULTİMEDYA/BİLGİ EKRANI	✓	✓
TERMAL KONTRAST KRİYOTERAPİ	✓	✓
UYARLANABİLİR YÖNLENDİRME	✓	✓
ASANSÖR	✓	✓
DEFLEKTÖRLER	✓	✓
AKTİF KURUTMA SİSTEMİ	✓	✓
OTURUM İZLEYİCİ	✓	✓
UZAKTAN TEŞHİS	✓	✓
GÜVENLİK TAHLİYE HAVALANDIRMASI	✓	✓
EGZOZ FANI	✓	✓
OKSİJEN İZLEME	x	✓
KAPI SENSÖRÜ	x	✓
NEM TAKİBİ	x	✓
BASINÇ TAKİBİ	x	✓
TREMOR ACİL DURDURMA	x	✓
KALP ATIŞ HIZI MONİTÖRÜ	x	✓

CRYO BOX XC PLUS | CRYO BOX XC

SİSTEMLER



BASINÇLI



BASINÇSIZ

AÇIKLAMA	CRYO BOX XC Basınçlı Sistem, sıvı nitrojen depolama ve tedariki için basınçlı tanklar ve kaplar kullanır.	CRYO BOX XC Basınçsız sistem, sıvı nitrojenin depolanması ve tedariki için basınçsız kaplar veya dewarlar kullanır.
KULLANILABİLİRLİK	CRYO BOX XC PLUS CRYO BOX XC	CRYO BOX XC PLUS CRYO BOX XC
SOĞUTMA ORTAMI	Basınçlı Sistem Sıvı Azot ile soğutulur	Basınçsız Sistem Sıvı Azot ile soğutulur
AZOT DEPOLAMA	Kapasite: 350L Optimize Basınç 1.5 -2.5 Bar 22-37 PSI *Basınçlı tanklar ve bağlantılar dahil değildir	Kapasite: 50L *Basınçsız sisteme iki adet dewar kabı dahildir.
LN2 TÜKETİMİ	Sıvı Nitrojen: 5L'den 8L'ye kadar	Sıvı Nitrojen: 4L'den 7L'ye kadar
ŞUNLAR İÇİN UYGUNDUR	Yüksek kapasiteli ve yoğun ziyaretçi alan yerler. Sağlık / İyileşme merkezleri, spor organizasyonları, fitness merkezleri, eğitim tesisleri, rehabilitasyon tesisleri, tıbbi tesisler / klinikler	Kriyoterapi girişimleri, sağlıklı yaşam/iyileşme merkezleri, kaplıcalar, spor organizasyonları, fitness merkezleri, eğitim tesisleri, güzellik merkezleri, ev ve özel kullanım, özel sosyal kulüpler

CRYO BOX XC PLUS | CRYO BOX XC

KURULUM

BASINÇLI SİSTEM



BASINÇSIZ SİSTEM



Her iki sistem için kurulum gereksinimleri

Alan

Minimum:

20m² | 200 sqft

Önerilen:

25m² | 270 sqft

Tavan Yüksekliği:

min. 7 ft 7 in | 230 cm

Ünitenin yönlendirilmesi

Bu, sınırlı alana sahip odalar için önemli bir faktör olabilir.

CRYO BOX XC, ünitenin esnek bir şekilde sola/sağa yönlendirilmesini sağlar.

Elektriksel özellikler

Max: 4000W · Idle: 140W · Oturum: 1000W · Kurulama: 3400W

208 to 240V | 50Hz - 60 Hz | 24A devre kesici önerilir.

Avrupa kıtası fişi ile donatılmıştır - Özel bir elektrik devresi ile değiştirilmesi gerekebilir (önerilir).

Havalandırma

Saatte en az altı hava değişimi gereklidir.

CRYO BOX XC PLUS | CRYO BOX XC

SPESİFİKASYON

SEANS SICAKLIĞI	Oturum Sıcaklık Aralığı - Önerilen Oturum Sıcaklık Aralığı - Genişletilmiş	-110 °C ila -140 °C / -166 °F ila -220 °F -110 °C ila -160 °C /-166 °F ila -256 °F
DEPOLAMA TANKLARI	Basınçlı Sistem Basıncsız Sistem	Tanklar Dahil Değildir 2x 50 Litrelik Kap Dahil
TÜKETİM	Basınçlı Sistem Basıncsız Sistem Elektrik	5 - 8 Litre (LN2) 4 - 7 Litre (LN2) Oturum: 1.000 W'a kadar Kurutma: 3.400 W'a kadar
ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ	Çıkış Gerilimi Frekans Amper	230V 50 Hz Min. 16 A
SERTİFİKASYONLAR	CE İşareti FDA 513 g Tıbbi Olmayan Cihaz	□ □
KURULUM GEREKLİLİKLERİ	Zemin Alanı Havalandırma Sıvı Azot	Min. 9 m ² / 97 ft ² Optimal 15 m ² / 160 ft ² Aktif Havalandırma / AC Düzenli Tedarik



Yükseklik
2200 mm
/ 7 ft 2 in

Genişlik
950 mm / 3 ft 1 in



Derinlik
1500 mm / 5 ft

Açıklık
1500 mm / 5 ft

Ağırlık: 340 - 360 kg
750 - 800 lb



HERKES İÇİN İYİLEŞME

Bizimle İletişime Geçin
daniel.manz@cryo-box.de

Bizi Ziyaret Edin
www.cryo-box.ch

